

Hãy Trải Nghiệm  
và Đặt Trọn  
Niềm Tin  
ở Nasopure

Dr. Hana's®  
**nasopure**®  
NASAL WASH



## BÌNH RỬA MŨI NASOPURE



- Thiết kế đột phá và được sản xuất theo dây chuyền công nghệ chuẩn Mỹ
- Tư thế đầu và cổ được giữ tự nhiên khi sử dụng.
- Không cần nghiêng hay xoay cổ.
- Tuyệt vời để mang theo khi dã ngoại, nút đậy kín.
- Dễ dàng điều chỉnh áp lực dòng phun và lưu lượng.
- Chất liệu bằng nhựa y tế (không chứa tạp BPA).
- Vạch chỉ mức nước theo chiều đúng, giúp tư thế luôn đúng và hiệu quả nhất.



## DUNG DỊCH MUỐI NASOPURE

Muối hòa tan Nasopure được sản xuất tại Mỹ do bác sĩ Hana nghiên cứu cùng với bộ bình rửa mũi Nasopure cho gia đình đang được bán chạy nhất hiện nay. Muối Nasopure có độ tương thích sinh học cao và độ pH trung tính.



### LIỀU DÙNG

Muối Nasopure sản xuất theo công thức độc quyền  
của Dr Hana thuộc BeWell/USA:

**% Sodium Chloride (NaCl) + %Sodium Bicarbonate (NaHCO3)**

Pha nước thành dung dịch đậm Nasopure có pH KIỀM (Bazo) nên sử dụng trong ngày. Ưu trương (nồng độ cao) hay Đẳng trương (nồng độ sinh lý) dùng theo mức độ bệnh nặng/nhẹ hoặc cần tăng hiệu quả hay rút ngắn thời gian điều trị.

Kích cỡ bình xịt	Dung dịch đẳng trương	Dung dịch ưu trương
4oz (~120ml)	1/2 gói muối Nasopure	1 gói muối Nasopure
8oz (~240ml)	1 gói muối Nasopure	2 gói muối Nasopure

- Liều phòng ngừa: 1 - 2 lần mỗi ngày cho mọi người
- Liều hỗ trợ điều trị (cấp độ viêm, nghẹt mũi nhẹ đến trung bình): 2 - 3 lần/ngày
- Liều hỗ trợ điều trị (cấp độ viêm, nghẹt mũi nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng): 3 - 5 lần/ngày. Số lần sử dụng có thể tăng theo khuyến cáo và chỉ định của chuyên gia.
- Dùng rửa mũi và súc miệng ngay sau khi tiếp xúc với các tác nhân gây nguy cơ cao như hóa chất, khói bụi, ô nhiễm, virus, vi khuẩn,... ở nơi công cộng, đi đường, phòng máy lạnh, kho xưởng, phòng khám, bệnh viện,...

*Dùng muối Nasopure để rửa sẽ tăng hiệu quả phòng ngừa và hỗ trợ điều trị, vừa đảm bảo an toàn tránh cảm giác bị sốc, dung dịch nhớt và có mùi hắc khó chịu của một số thành phần tá dược đậm trong các sản phẩm khác!*

THÔNG TIN NHÀ SÁNG LẬP:

**TIẾN SĨ BÁC SĨ NHỊ KHOA DR.HANA R.SOLOMON**

THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT TTBYT HUỖNH NGỌC**  
**HOTLINE: (848) 286264.9088 - (848) 286264.9096**

**BỘ RỬA MŨI DỄ CHỊU  
NHẤT THẾ GIỚI**

- Sản xuất tại Missouri, USA
- Chất liệu Nhựa BPA Free
- Đảm bảo sự hài lòng
- Tái chế 100%
- Hiệp hội các bà mẹ tin dùng
- Đóng gói bởi người khuyết tật